

# Implantes pectorales

Implantes pectorales rellenos de gel de silicona disponibles en formas anatómicas

POLYTECH



# Implantes pectorales

## Descripción del producto

Los implantes pectorales rellenos de gel de silicona están disponibles con una superficie lisa o microtexturizada para el aumento y la reconstrucción, para compensar deficiencias de los tejidos blandos.

Los implantes pectorales son de un solo lumen, están disponibles en tres tamaños diferentes y están hechos para adaptarse de lado izquierdo o derecho del pecho.

## Información del producto

La cubierta de todos los implantes pectorales se compone de un elastómero de silicona fuerte, resistente y altamente elástico que posee una capa de barrera. Los implantes están rellenos de un gel de silicona altamente reticulado (Shapar Gel™). Se ha seleccionado un gel firme, porque los implantes están reemplazando a un músculo.

La fabricación de los implantes se basa en la norma la calidad ISO 13485. Todos los materiales empleados son de calidad médica implantable.

Los implantes pectorales se usan para la cirugía estética y de reconstrucción. La vía de acceso suele ser axilar, con el paciente colocado en posición supina y el brazo en abducción de 90° con el fin de elevar el músculo. Los implantes se pueden colocar de manera submuscular.

## Indicaciones

- Aumento
- Corrección del contorno
- Reconstrucción, p. ej. después de un traumatismo
- Síndrome de Poland
- Cambio de implante

## Información importante

Los implantes pectorales se entregan embalados individualmente y estériles.


**ATENCIÓN:** Tenga en cuenta las instrucciones de uso detalladas que se incluyen con cada producto.



### Implantes pectorales - POLYsmooth™ ● C€ 0483

Relleno de gel de silicona, superficie lisa, embalado individualmente, estéril

N° de pedido	Dimensiones (cm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
10500-190L <sup>1</sup>	14.7	10.2	2.4	190
10500-190R <sup>1</sup>	14.7	10.2	2.4	190
10500-230L <sup>1</sup>	16.0	10.7	2.7	230
10500-230R <sup>1</sup>	16.0	10.7	2.7	230
10500-300L <sup>1</sup>	16.9	11.6	2.9	300
10500-300R <sup>1</sup>	16.9	11.6	2.9	300

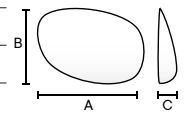

L = Izquierdo / R = Derecho


Medidas aproximadas

<sup>1</sup> Entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden

### Implantes pectorales - MESMO® ● C€ 0483

Relleno de gel de silicona, superficie microtexturizada, embalado individualmente, estéril

N° de pedido	Dimensiones (cm)			Volumen (ml)
	A	B	C	
15500-190L <sup>1</sup>	14.7	10.2	2.4	190
15500-190R <sup>1</sup>	14.7	10.2	2.4	190
15500-230L <sup>1</sup>	16.0	10.7	2.7	230
15500-230R <sup>1</sup>	16.0	10.7	2.7	230
15500-300L <sup>1</sup>	16.9	11.6	2.9	300
15500-300R <sup>1</sup>	16.9	11.6	2.9	300

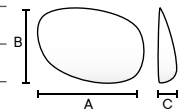


L = Izquierdo / R = Derecho


Medidas aproximadas

<sup>1</sup> Entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden


## LA TÉCNICA QUIRÚRGICA

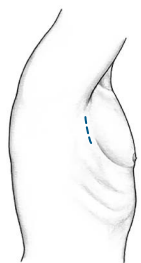

Incisión

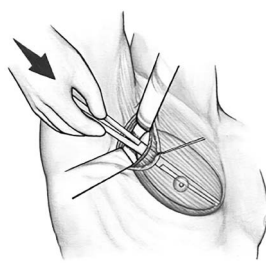

Introducción y colocación

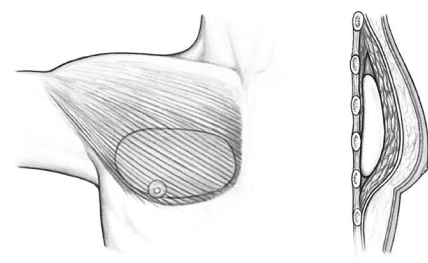

Resultado final